

NÁVOD PRO LÉKAŘSKÉ KONCENTRÁTORY KYSLÍKU ŘADY AE

Videonávod zde :
<https://youtu.be/nKOEWDdMd5w>



Předmluva

Účel příručky

Pokyny mají uživatelům poskytnout tipy, jak bezpečně a efektivně obsluhovat toto zařízení. Uživatel by měl toto zařízení obsluhovat podle pokynů.

Tento návod k obsluze podrobně popisuje použití, funkci a provoz kyslíkových koncentrátorů řady AE. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, abyste zajistili správnou funkci a zaručili bezpečnost pacienta a uživatele. Uschovejte tento návod vedle zařízení pro pohodlné použití. Uživatelé používající zařízení v případě problémů by měli kontaktovat prodejce nebo výrobce.

Tato příručka je určena pro uživatele, zdravotníky, prodejce a servisní techniky.

Uživatel by měl používat toto zařízení pouze v souladu s jeho zamýšleným použitím.

Licence a ochranné známky

AERTI je registrovaná ochranná známka společnosti SHENYANG AERTITECH CO., LTD Správná funkce tohoto zařízení je zaručena pouze v případě, že je zařízení používáno za specifikovaných podmínek (příslušenství / hardware / software) vysvětlených v tomto návodu. Aktualizace nebo jiné úpravy tohoto zařízení mohou ovlivnit jeho kompatibilitu. Požádejte o pomoc zákaznický servis. Nedodržení těchto doporučení může vést ke ztrátě záruky.

Kompatibilita

Toto zařízení by nemělo být propojeno s žádnými jinými zařízeními nebo součástmi, pokud není určeno, že tato zařízení a součásti jsou se zařízením kompatibilní. Montáž, rozšiřování, seřizování, úpravy a údržbu by měl provádět kvalifikovaný servisní personál k tomu oprávněný výrobcem.

Výrobce nenese odpovědnost za výskyt nepřesných údajů a poškození zařízení způsobené nekompatibilním externím zařízením používaným uživatelem. Zařízení lze připojit pouze s příslušenstvím specifikovaným výrobcem, jako jsou: nosní kanyla, zvlhčovač. Vývod nebulizace lze připojit k nebulizátoru specifikovanému výrobcem.

Odpovědnost

SHENYANG AERTI TECH CO., LTD. si vyhrazuje právo změnit Uživatelský manuál bez upozornění. SHENYANG AERTITECH CO., LTD. nenese odpovědnost za software a zařízení poskytovaná jinými společnostmi než SHENYANG AERTI TECH CO., LTD. a distributory.

SHENYANG AERTI TECH CO., LTD. odpovídá za bezpečnost, spolehlivost a provoz produktu za předpokladu, že jsou splněny všechny následující podmínky:

- Instalaci, rozšíření, seřízení, vylepšení a údržbu provedou odborníci autorizovaní společností SHENYANG AERTI TECH CO., LTD ..
- Pro údržbu včetně výměny náhradních dílů, příslušenství a spotřebního materiálu budou použity originální sady nebo sady autorizované společností SHENYANGAERTI TECH CO., LTD.
- Příslušné příslušenství splňuje normy IEC / EN nebo ekvivalentní normy a požadavky této uživatelské příručky.

Výjimky

SHENYANG AERTI TECH CO., LTD. povinnost nebo odpovědnost podle této záruky nezahrnuje přepravní nebo jiné poplatky nebo odpovědnost za přímé, nepřímé nebo následné škody nebo zpoždění vyplývající z nesprávného použití nebo aplikace produktu nebo použití dílů nebo příslušenství neschválených společností SHENYANGAERTITECHCO.SP.ZO. GAERT nebo opraveny autorizovaným personálem. Tato záruka se nevztahuje na:

- Porucha nebo poškození způsobené nesprávným použitím nebo poruchou způsobenou uživatelem.
- Porucha nebo poškození v důsledku vyšší moci, jako je požár nebo zemětřesení.
- Porucha nebo poškození způsobené nesprávnou obsluhou nebo opravou nekvalifikovaným nebo neautorizovaným servisním personálem. Jiné nejsou způsobeny samotným zařízením nebo jeho částí.

Děkujeme vám za zakoupení našeho kyslíkového koncentrátoru a doufáme, že budete s našimi produkty spokojeni.

Upozorňujeme, že některé symboly použité v této příručce nemusí přesně odpovídat tomu, co je na zařízení, za což se omlouváme.

BEZPEČNOSTNÍ

1.1 Bezpečnostní informace



• Bezpečnostní prohlášení v této kapitole odkazují na základní bezpečnostní informace, které byste měli dodržovat a dodržovat. V jiných kapitolách nebo oddílech jsou uvedena další prohlášení o zabezpečení, která mohou být stejná, podobná následujícímu nebo specifická pro operaci.

Označuje potenciální nebezpečí nebo nebezpečné postupy, které, pokud se jim nevyhnete, mohou mít za následek smrt nebo vážné zranění.

Poskytuje tipy k použití nebo jiné užitečné informace pro zajištění nejlepšího výkonu produktu.

VAROVÁNÍ

- Přípravek je určen k podávání kyslíku, nikoli k podpoře nebo prodloužení života, nikoli k poskytování první pomoci. Při použití přístroje se doporučuje nastavit průtok kyslíku a dobu inhalace pacienta podle doporučení lékaře. Pacienti by měli být pod dohledem lékaře, aby zvolil individuální nastavení dodávky kyslíku.
- Pokud během kyslíkové terapie zaznamenáte nepohodlí nebo náhlé onemocnění, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pokud zařízení používá vážně nemocný pacient, je třeba zajistit další náhradní zařízení. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to, prosím, ihned svému lékaři.
- Otevřený oheň během oxygenoterapie je nebezpečný a může vést k požáru nebo smrti. Neumisťujte kyslíkový koncentrátor nebo příslušenství přenášející kyslík méně než 2 metry od otevřeného ohně. Kromě toho je zařízení určeno pouze pro vnitřní použití.
- Kouření při příjmu kyslíku je nebezpečné a může způsobit popáleniny obličeje nebo smrt. Nedovolte kouření ve stejné místnosti jako kyslíkový koncentrátor nebo jakékoli zásoby kyslíku. Chcete-li kouřit, vždy vypněte koncentrátor kyslíku, vyjměte kanylu a opusťte místnost s kanylou, maskou nebo koncentrátorem kyslíku. Pokud nemůžete opustit místnost, počkejte 10 minut po vypnutí koncentrátoru kyslíku, než začnete kouřit.
- Neumisťujte koncentrátor kyslíku do blízkosti silných magnetických polí nebo zdrojů elektromagnetického rušení.
- Kyslík usnadňuje zapálení a šíření ohně. Nenechávejte nosní kanylu nebo masku na přikrývkách nebo polštářích židlí, pokud je koncentrátor kyslíku zapnutý, ale nepoužívá se; Pokud koncentrátor kyslíku nepoužíváte, vypněte jej, abyste zabránili obohacení kyslíkem.
- Vyhněte se nadměrné délce nosní kanyly, abyste předešli riziku udušení.

- Před kyslíkovou terapií a během ní používejte pouze vody nebo masti na vodní bázi, které jsou kompatibilní s kyslíkem. Abyste se vyhnuli riziku požáru a popálenin, používejte vazelínu nebo tekuté masti nebo oleje.
- Před zahájením údržby se ujistěte, že je zástrčka koncentrátoru kyslíku vytažena ze zásuvky, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
- Abyste zabránili úrazu elektrickým proudem, neotevírejte sami skříň kyslíkového koncentrátoru. V případě jakýchkoliv problémů s provozem by uživatel neměl rozebírat za účelem údržby sám, ale v případě výskytu jakýchkoli nežádoucích jevů by měl kontaktovat prodejce nebo výrobce (viz „Nežádoucí reakce a odstraňování problémů“)
- Nelijte žádné tekutiny, organická rozpouštědla nebo čisticí prostředky přímo na kryt koncentrátoru kyslíku.
- Abyste se ujistili, že dostáváte správný terapeutický přívod kyslíku:
 - používejte pouze v případě, že jedno nebo více nastavení bylo individuálně definováno nebo předepsáno pro pacienta na příslušných úrovních aktivity.
 - použití se specifickou kombinací dílů a příslušenství, které odpovídají specifikacím výrobce náboje a které byly použity při stanovení nastavení.
- Abyste předešli riziku požáru a popálení, nemažte armatury, spoje, hadičky ani jiné příslušenství koncentrátoru kyslíku.
- Pro zajištění správné funkce a pro zamezení nebezpečí požáru a popálení používejte pouze náhradní díly doporučené výrobcem.

1

- Očekává se, že použití tohoto zařízení v nadmořské výšce nad 1060 hPa nebo mimo teplotní rozsah 5 ~ 40 °C nebo relativní vlhkost nad 93 % nepříznivě ovlivní průtok a procento kyslíku a následně kvalitu terapie.
- Geriatricí, dětští nebo jiní pacienti, kteří nejsou schopni sdělit nepohodlí, mohou vyžadovat dodatečné monitorování a/nebo další poplašný systém, aby bylo možné sdělit informace o nepohodlí a/nebo naléhavé lékařské potřebě odpovědnému pečovateli.
- Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od zařízení, aby nedošlo k udušení.

POZORNOST

- Zařízení by mělo být používáno v čisté, bezprašné, dobře větrané místnosti s netoxickým plynem, kde nedochází ke korozi.
- Abyste zabránili poškození spotřebiče, nepoužívejte jej, dokud není nainstalován vysoce účinný filtr nebo dokud není vstupní filtr zcela suchý.
- Při používání zařízení se ujistěte, že ventilační otvory fungují správně, jinak může dojít k přehřátí zařízení.
- Během provozu nepokládejte zařízení na bok ani jej nepřevracejte.
- Před přepravou zařízení vylijte vodu ze zvlhčovače, aby se voda nevyhlila.
- Při používání spotřebiče je slyšet přerušované pípání (interval je asi 10 sekund).
- Kyslíkový koncentrátor potřebuje 5 minut k dosažení správného výkonu od okamžiku zapnutí.
- Stroj nespouštějte ani nezastavujte často: interval mezi opětovným spuštěním po zastavení nesmí být kratší než 5 minut (t.j. vzduch ve stroji musí být zcela vyčištěn, aby se zabránilo spuštění kompresoru stlačeného vzduchu, což ovlivní jeho životnost) . Naplňte zvlhčovač destilovanou nebo převařenou studenou vodou a dávkované množství by mělo být mezi ryskami maxima a minima.
- Použitý zvlhčovač by měl odpovídat specifikacím podpůrného produktu a neměl by být volně vyměňován, protože to může způsobit nepohodlí a jiná rizika.

- V koncentrátoru kyslíku vyčistěte zvlhčovač, bavlněný filtr a vysoce účinný filtr. Zvlhčovač by se měl čistit každé 3 dny, vnější bavlněný filtr by se měl čistit přibližně každých 100 hodin a vysoce účinný filtr by měl být vyměněn přibližně každých 1 500 hodin.
- Ujistěte se, že je napájení zapnuto přes jednotný výstup kyslíku.
- Voda ve zvlhčovači by měla být vyměněna každé 2-3 dny, zejména v létě. Pokud bylo zařízení několik dní nečinné, odstraňte vodu ze zvlhčovače a vysušte jej.
- Používejte nosní kanylu, která vyhovuje specifikaci podpůrného přípravku (nepoužívejte dětskou kanylu u dospělých pacientů). Pokud používáte jinou nosní kanylu, ujistěte se, že je pevně a bezpečně připojena ke koncentrátoru kyslíku. K zajištění kanyly, aby se zabránilo jejímu vypadnutí, lze použít jednorázové nylonové pásky. Nosní kanyla je určena pro jednorázové použití nebo pouze pro jednoho pacienta a měla by se čistit každé tři dny. Nosní konec nosní kanyly by měl být po každém použití otřen lékařským lihem. Doporučuje se nosní kanylu jednou nebo na měsíce vyměnit a po použití ji nevyhazovat.
- Jedna nosní kanyla je pouze pro jednoho pacienta.
- Nepoužívejte jiná maziva než ta, která doporučuje výrobce.
- Likvidace zařízení a jeho příslušenství by měla být v souladu s místními zákony.
- Na výtlačku kompresoru je umístěno zařízení pro vypouštění tlaku (pojistný ventil) a pracovní tlak je 270 ± 10 % KPa.
- Protože je zařízení určeno pro použití v domácím prostředí, faktory jako výkon, teplota a vlhkost a chyby uživatele ovlivní základní bezpečnost a provoz zařízení, přečtěte si prosím pozorně tuto příručku.
- Zabraňte kontaktu zařízení s dětmi a domácími zvířaty, protože mohou ovlivnit základní bezpečnost a provoz zařízení.
- Před použitím se ujistěte, že je napájecí adaptér správně připojen.
- Když je okolní teplota 20 °C, trvá přibližně 4 hodiny, než se koncentrátor kyslíku zahřeje z minimální skladovací teploty, dokud není zařízení připraveno k použití.
- Když je okolní teplota 20 °C, trvá přibližně 2 hodiny, než se koncentrátor kyslíku ochladí z maximální skladovací teploty, dokud není zařízení připraveno k použití.

ZÁKLADNÍ POKYNY

2.1 Zamýšlené použití

Lékařské použití: nemocnice a domácí použití, lékařské jednotky v oblastech, kde je obtížné dodávat kyslík, k léčbě plicních onemocnění, obstrukční plicní nemoci, pneumotoraxu.

Kontraindikace: invalidní pacienti s těžkou otravou oxidem uhelnatým.

2.2 Informace o produktu

Výrobek je druh přenosného malého kyslíkového koncentrátoru, který využívá principu tlakové swing adsorpce (PSA) se vzduchem jako surovinou a zeolitovým molekulárním sítem (ZMS) jako absorbentem. Odděluje kyslík od dusíku a dalších plynů ve vzduchu. Při zapnutí a při normální teplotě a tlaku nepřetržitě odděluje kyslík od vzduchu v koncentraci 90 % až 96 %.

Použití zařízení neovlivní obsah kyslíku v okolním vzduchu. Principy činnosti naleznete ve schématu.

2.3 Konstrukce

Výrobek se skládá z generátoru kyslíku, indikátoru průtoku, výstražného systému a nebulizačního rozhraní (volitelně) Využívá principu tlakové swing adsorpce s molekulárním sítem k produkci 90% -96% kyslíku.

2.4 Životnost

Předpokládaná životnost celého zařízení je až 20 000 hodin.

Prostředí použití

Použijte prostředí

Specifikace teplota + 5 ° C ~ + 40 ° C

atmosférický tlak 700hPa ~ 1060hPa

vlhkost vzduchu

15% ~ 90% nekondenzující, nevyžaduje parciální tlak vodní páry vyšší než 50 hPa

Vstup zdroje vzduchu do koncentrátoru kyslíku by měl být v místě s co nejmenším znečištěním a jeho okolí by mělo být bez korozivních plynů, výparů a silné magnetické pole.

Podmínky přepravy a skladování

vlhkost vzduchu

-20 °C až + 35 °C

až 90 % bez kondenzace,

> 35 °C až 70 °C při parciálním tlaku vodní páry do 50 hPa

Použijte prostředí

2.7 Klasifikace produktu

teplota

atmosférický tlak

Specifikace

-20 °C ~ + 70 °C

500hPa ~ 1060hPa

2.7 Klasifikace produktu

Teplota -20 °C ~ + 70 °C

atmosférický tlak 500hPa ~ 1060hPa

Specifikace

Klasifikace podle ochrany před úrazem elektrickým proudem: Třída II Typ BF

Rozdělení podle způsobu produkce kyslíku: Generování kyslíku molekulárním sítem - kontinuální provoz

Klasifikace podle tvaru / struktury: Přenosná zařízení

Klasifikace EMC: Skupina 1 Typ B

Klasifikace podle stupně ochrany proti vniknutí kapaliny: IP21

Bezpečnostní klasifikace pro použití v hořlavém anestetickém plynu smíchaném se vzduchem nebo v hořlavém anestetickém plynu smíchaném s kyslíkem

/ Oxid dusnatý: Nepoužívejte toto zařízení v přítomnosti hořlavého anestetického plynu smíchaného se vzduchem nebo hořlavého anestetického plynu smíchaného s kyslíkem / oxidem dusným

Technické specifikace

Specifikace typu : AE-X-X

AE : Koncentrátor kyslíku řady AE

X : Kód projektu:

(3.5 a 8 ukazují jmenovitý průtok 3 l/min, 5 l/min a 8 l/min samostatně)

X: Kód funkce

(Žádný funkční kód: Standardní;

W: S alarmem nízké hladiny kyslíku;

N: S výstupním rozhraním pro nebulizaci;

NW: S alarmem nízkého obsahu kyslíku a rozhraním výstupu nebulizace;

S: S alarmem nízkého kyslíku, rozhraním výstupu nebulizace a alarmem vysokého a nízkého tlaku

Příklad: AE-5 představuje standardní model s jmenovitým průtokem 5 l/min;


AE-5-W představuje model alarmu nízkého obsahu kyslíku s jmenovitým průtokem 5 l/min;

AE-5-N představuje model s výstupním rozhraním nebulizace;

AE-5-NW představuje model s alarmem nízkého obsahu kyslíku, rozhraním výstupu

nebulizace; AE-5-S Představuje model alarmu nízkého obsahu kyslíku, rozhraní výstupu nebulizace a alarm vysokého a nízkého tlaku

Vzhled:

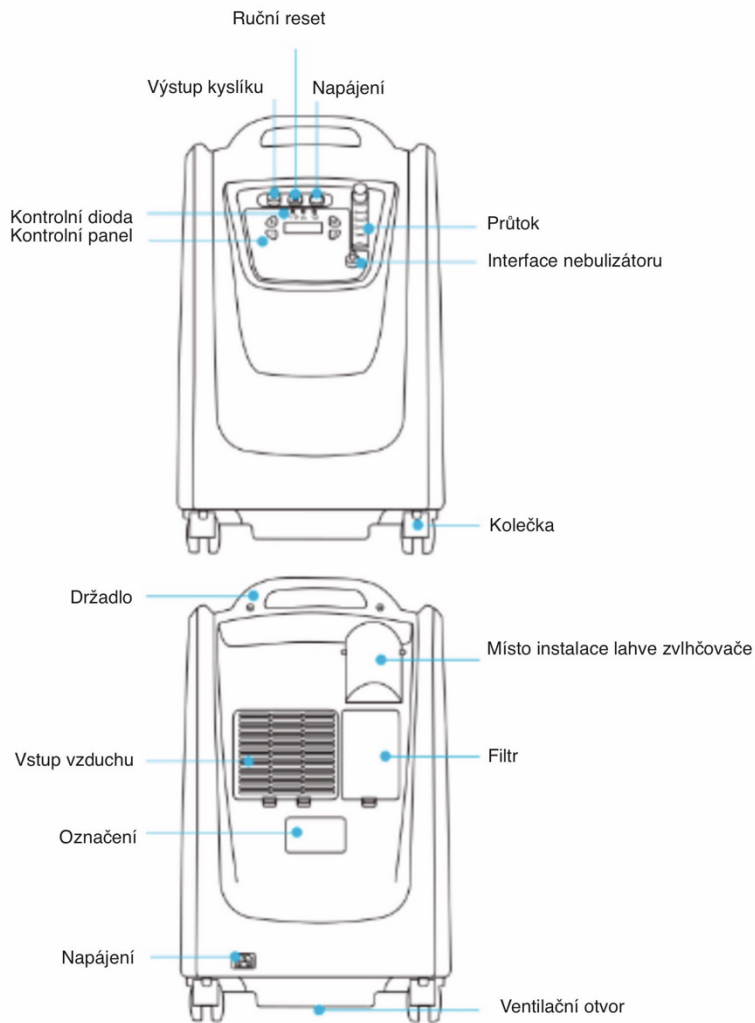

Pojistka v modelu zařízení:

F5A250V

Poloha plováku v průtokoměru kyslíku udává průtok kyslíku (l / min). Knoflíkový spínač v průtokoměru kyslíku je také známý jako ventil pro regulaci průtoku, kterým lze regulovat a řídit průtok kyslíku. Neotáčejte knoflíkem příliš, mohlo by dojít k poškození součásti ventilu. ve směru hodinových ručiček, když je zapnutý, a ve směru hodinových ručiček, když je vypnutý.

Kontrolní diody:


Následující tři LED diody jsou umístěny zleva doprava: Napájení (zelená signalizuje normální stav, červená signalizuje poruchu, tato LED nesvítí pro alarm nízkého kyslíku), LED koncentrace kyslíku (zelená signalizuje normální stav, červená signalizuje alarm – koncentrace kyslíku je nižší než 82 %)

Stiskněte tlačítko ("PressButton"):

Slouží k nastavení doby synchronizace stavu inhalovaného kyslíku a k přepínání mezi režimem kontinuální inhalace kyslíku a režimem dočasné inhalace.

Displej ("Zobrazení"):

Může zobrazovat kumulativní dobu provozu koncentrátoru kyslíku, dobu provozu zařízení a příčiny poruch.

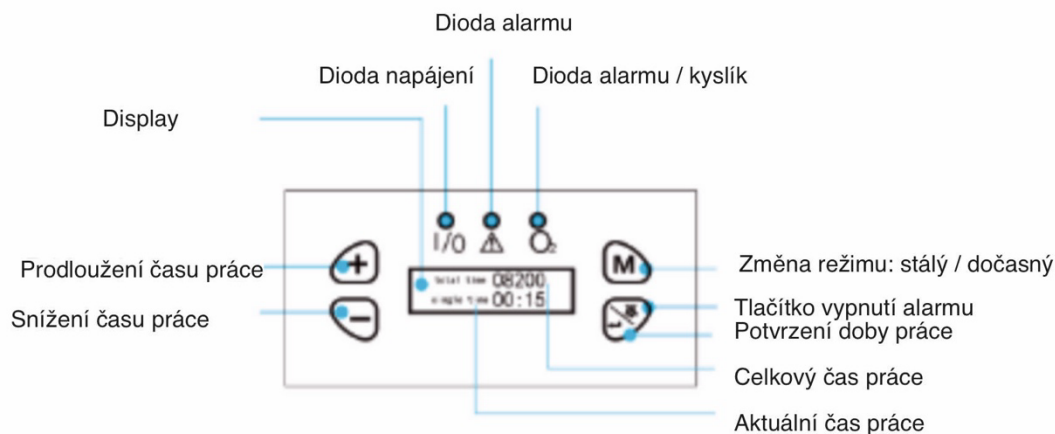


PROVOZ KONCENTRÁTORU

4.1 První použití kontroly výkonu

Pokud při kontrole zjistíte nějaké nesrovnalosti, kontaktujte prosím prodejce nebo výrobce.

4.1.1 Řízení průtoku kyslíku

Připojte nosní kanylu ke vstupnímu portu kyslíkového koncentrátoru nebo, pokud je použit, ke vstupnímu portu zvlhčovače (viz obrázek). Se zapnutým kyslíkovým koncentrátorem nastavte průtokoměr na požadovaný průtok. Kyslík by měl volně proudit do nosní kanyly. Uživatel by měl být schopen slyšet nebo cítit plyn proudící do nosní kanyly. Pokud necítíte proudění kyslíku, zkontrolujte těsnost připojení kanyly (viz obrázek).

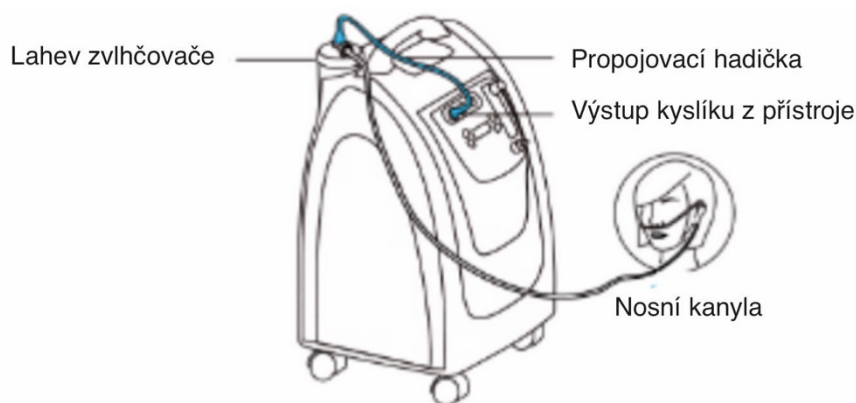

4.1.2 Kontrola poplašného systému

4.1.2.1 Alarm výpadku napájení

Zapněte kyslíkový koncentrátor, odpojte napájení, zazní alarm koncentrátoru kyslíku.

4.1.2.2. Alarm nízké koncentrace kyslíku

Zapněte koncentrátor kyslíku, po 5 minutách provozu přiložte měřič koncentrace kyslíku k výstupnímu konektoru koncentrátoru kyslíku, upravte hladinu na displeji koncentrátoru kyslíku na stav koncentrace kyslíku, zkontrolujte, zda jsou hodnoty měřiče koncentrace kyslíku a kyslíku displej koncentrátoru je konzistentní.

4.1.2.3 Alarm přehřátí

Zapněte koncentrátor kyslíku, po 5 minutách provozu přiložte měřič teploty ke vstupnímu konektoru koncentrátoru kyslíku, úroveň na displeji koncentrátoru kyslíku na stav teploty kyslíku, zkontrolujte, zda jsou hodnoty měřiče teploty a displej koncentrátoru kyslíku konzistentní.

4.2 Operační kroky

4.2.1 Kyslíkový koncentrátor by měl být umístěn na místě s dostatečným příívodem kyslíku a dobrou ventilací a ve vzdálenosti nejméně 20 cm od stěn, závěsů a jiných předmětů;

4.2.2 Odšroubujte zvlhčovač otáčením ve směru hodinových ručiček, nalijte příslušné množství destilované vody nebo studené převařené vody až po úroveň rysky a poté zvlhčovač utáhněte; (viz obrázek)




4.2.3 Instalace zvlhčovače: Umístěte a nasadte zvlhčovač do drážky na zadní straně koncentrátoru kyslíku a připojte kyslíkovou hadici k výstupu kyslíku.

4.2.4 Připojení napájení: Zasuňte zástrčku do elektrické zásuvky koncentrátoru kyslíku; zasuňte druhou zástrčku do zásuvky a zapněte napájení pomocí vypínače na jednotce. (viz obrázek)




4.2.5 Podle potřeby upravte průtok kyslíku. Červená čára průtokoměru je výstražná čára a průtok kyslíku ve výstražné čáře pro minus 0,5 l/min je jmenovitý průtok (proti směru hodinových ručiček, jak je znázorněno).

ne ve směru hodinových ručiček - je vypnuto). Je velmi důležité nastavit průtok kyslíku podle pokynů lékaře. Bez porady s lékařem nesnižujte ani nezvyšujte množství kyslíku, který jím protéká. Dodržujte průtoky kyslíku a dobu inhalace kyslíku předepsanou lékařem. (viz obrázek)

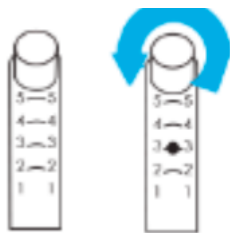

Poznámka: Přesnost průtokoměru je $\pm 10\%$. Během normálního provozu se nedotýkejte nastavovacího knoflíku průtokoměru, abyste předešli neúmyslným změnám na výstupu průtoku kyslíku.

4.2.6 Vložte vstup nosní kanyly do výstupu kyslíku, umístěte nosní kanylu za uši uživatele a umístěte nosní část s kyslíkovou trubicí do nosu uživatele pro dodávku kyslíku; (viz obrázek)

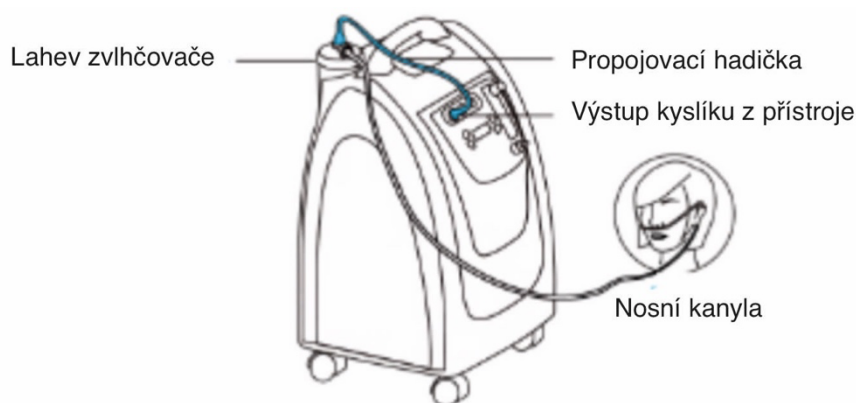

4.2.7 Po použití zařízení vypněte hlavní vypínač. Nebudete-li zařízení v blízké budoucnosti znovu používat, odpojte napájecí kabel.

4.2.8 Chcete-li zapnout měření doby inhalace kyslíku, stiskněte tlačítko „M“, doba měření začne blikat, nastavte dobu měření tlačítky „nahoru a dolů“ a poté stiskněte tlačítko „enter tj šipka doleva“ pro vstup do měření doby inhalace kyslíku režimu. V režimu měření času můžete stisknutím tlačítka „M“ přepnout zařízení do nepřetržitého provozu.

ÚDRŽBA

5.1 Čištění láhve zvlhčovače (uživatelsky opravitelné)

Vyjměte láhev zvlhčovače z přístroje, umyjte a vyčistěte teplou vodou a jemným čisticím prostředkem, poté opláchněte čistou vodou. Smíchejte bílý ocet s horkou vodou v poměru 1:3, namočte do směsi nádobu zvlhčovače na 30 minut, aby se sterilizoval. Poté, co láhev zvlhčovače důkladně opláchnete v teplé vodě, osušte ji a odložte stranou.

5.2 Čištění krytu (může být provedeno uživatelem)

K čištění krytu použijte čistý, měkký a mokrý ručník s trochou neutrálního čisticího prostředku na nábytek, otřete všechny části krytu a poté osušte suchým ručníkem. Čistěte 1 až 2 krát za měsíc. Před čištěním se ujistěte, že je zařízení zcela vypnuté.

5.3 Čištění bavlněného filtru (uživatelem)

Otevřete zadní kryt a vyjměte bavlněný filtr, vyčistěte filtr teplou vodou a saponátem a poté důkladně opláchněte čistou vodou, abyste odstranili přebytečnou vlhkost. Poté nechte filtr uschnout na vzduchu a po úplném vyschnutí jej nainstalujte do jednotky.

5.4 Výměna vysoce účinného filtru (obslužný uživatelem)

Toto zařízení má funkci pravidelného připomínání údržby. Když celková provozní doba spotřebiče dosáhne 1500 hodin, na displeji se zobrazí připomenutí a také se objeví zvuková zpráva. Otevřete kryt vysoce účinného filtru, vyjměte starý filtr a vyměňte jej za nový (pro zakoupení vysoce účinného filtru se obraťte na výrobce nebo prodejce). Po výměně vysoce účinného filtru jej vyjměte stisknutím " "enter" šipka vlevo" upozornění na výměnu filtru.

Schéma průtoku v koncentrátoru kyslíku


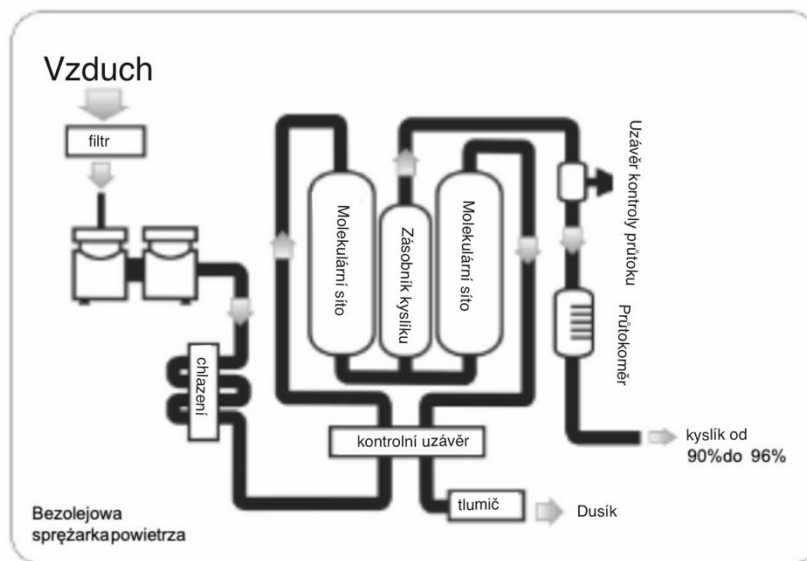


Schéma zapojení kabeláže v koncentrátoru kyslíku

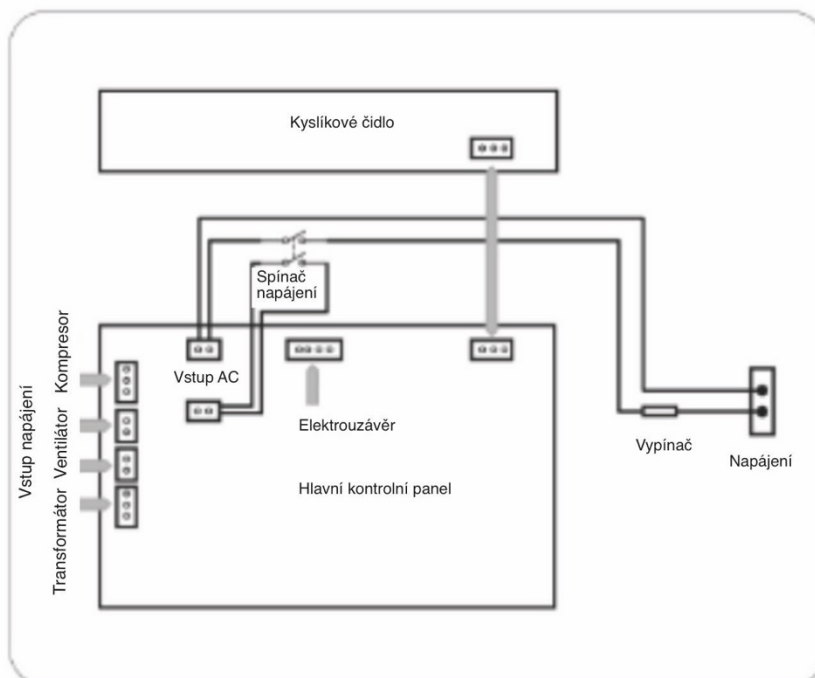

Poznámka: Schéma zapojení a seznam součástí/dílů nejsou informacemi pro opravu koncentrátoru kyslíku. Minimální dostupnou jednotkou pro položku údržby je deska plošných spojů, kterou lze získat v poprodejním oddělení.

ZÁRUKA

1. Společnost REHA FUND ujišťuje kupujícího, že předmět prodeje, ke kterému je vystaven tento záruční list, je zcela nový a v dobré kvalitě.
2. Záruční doba na kyslíkový koncentrátor AE-5W je 24 měsíců a počítá se od data nákupu kupujícím.
3. Základem pro posouzení reklamace je dodání čistého, kompletního výrobku se správně vyplněným záručním listem a dokladem o koupi (účtenka, faktura s DPH). Nedostatek dokumentů nebo doručení kontaminovaného produktu má za následek pozastavení nebo zamítnutí posouzení reklamace.
4. Reklamace jsou vyřizovány neprodleně v co nejkratší době, ne déle než 14 dnů od okamžiku doručení zboží do servisního střediska. V případě dovozu dílů potřebných k opravě ze zahraničí může být tato lhůta prodloužena, o čemž bude reklamující informován.
5. Servis má právo odmítnout záruční opravu v případě, že je záruční list nečitelný nebo došlo ke změně či opravě jakýchkoliv údajů.
6. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným nebo neodpovídajícím způsobem s návodem k použití, údržbě a skladování, jakož i v důsledku náhodných událostí.
7. V případě neoprávněné reklamace (výrobek v provozuschopném stavu) nebo kdy byla škoda způsobena vinou uživatele, nese veškeré náklady spojené s projednáním reklamace reklamující.
8. Provádění jakýchkoli oprav nebo úprav bez nahlášení autorizovanému servisnímu středisku bude mít za následek okamžitou ztrátu záručních práv.
9. Stížnosti nahlašte přímo na prodejním místě nebo u společnosti REHA FUND, ul. Staniewicka 14.03–310 Varšava, tel.: 22 / 594-03-00, 8:00 - 16:00 hod. Společnost RehaFund zajišťuje záruční a pozáruční servis.
10. Tato záruka žádným způsobem neomezuje, nepozastavuje ani nevylučuje vaše práva Kupující ve vztahu k Prodávajícímu z důvodu smluvních a zákonných nároků.

Dovozce:

REHA FUND Sp.Z o.o. ul. Staniewicka 14, 03-310 Varšava

Tel: +48 22 5940300, Fax: +48 22 5940307 e-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl

Výrobce:

SHENYANG AERTI TECH CO., LTD.

č. 30 Huahai Road, Shenyang Economic & Technological Development Area, ShenyangCity, 110141

Provincie Liaoning, Čína

Tel: + 86-024-25335449

E-mail: ann@airtech-med.com

EC-REP

Well Kang Limited

The Black Church, St. Mary's Place,

Dublin 7, D07 P4AX, Ireland

Tel: +353(1)4433560 Fax:+353(1)6864856 www.CE-marking.eu
E-mail: AuthRep@CE-marking.eu






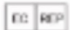
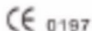








Prodejce v ČR:

MEDICALIS – MGR. PETR ORAVSKI

U lesa 772/26, Karviná 4, 73401, email: obchod@medicalis.cz

IP22



	Výrobce		Datum výroby
	Sériové číslo		Třída II, dvojitá izolace
	Typ BF		Zástupce v EU
	Certifikace CE (soulad s normami EU)		Křehké
	Skladování ve vrstvách		Nešlapat
	Zákaz kouření		Neužívejte u otevřeného ohně !
	Prostudujte návod		Nevyhazujte do komunálního odpadu
	Touto stranou nahoru	IP21	IP klasifikace